

Bedienungsanleitung Funk-Sicherheit-Abschalter:

Alle unsere Liegen die mit Fußbodenschalter oder Fußbügelschalter ausgerüstet sind, werden mit einer Sicherheit-Abschalt-Einrichtung versehen. Mit dieser können Sie die Liege stromlos und damit funktionslos schalten damit in Abwesenheit von befugtem Personal kein unbefugtes Benutzen/Bedienen der Liege möglich ist.

Ihrer Liege liegt ein 4-Kanal Funkschalter bei. Mit diesem können bis zu 4 Liegen aus unserem Hause jeweils an oder ausgeschaltet werden. Kunden die z. B. nur eine Liege von RelaxSensation besitzen, benötigen also nur das oberste Schalterpaar auf der Fernbedienung. Das Schalten auf dieser Fernbedienung dient nur dazu, um den Strom zur Liege an- oder auszuschalten. Eine Bedienung der Funktionen der Liege ist über diese Funkfernbedienung nicht möglich.

Zum Steuern der Funktionen (Höheneinstellung, Kopfteil etc.) benutzen Sie die an der Liege verbauten Handtaster bzw. den Fußbügel/Fußschalter.

Sollte die Liege einmal von Netz getrennt werden aufgrund von Stromausfall oder Ausstecken der Liege von der Steckdose, ist nach Wiederkehr des Stromes zur Liege der Funkschalter automatisch wieder auf „AUS“.

Sie müssen dann nur mit der Funkfernbedienung die Liege wieder anschalten.