



## RelaxSensation – Massageliegen aus Holz

Bedienungsanleitung – CE – Kennzeichnung und Garantiekarte

Heizdecke mit digitalem Handcontroller



Hersteller: RelaxSensation, Franz-Geist-Str. 21, 83119 Obing

Tel.: +49 8624 / 8750650 Mail: [info@relax-sensation.de](mailto:info@relax-sensation.de)

Web: [www.relax-sensation.de](http://www.relax-sensation.de)



# 1. Einführung

Vielen Dank für den Kauf der Heizdecke aus unserem Sortiment. Wir wünschen Ihnen und Ihren Patienten und Kunden viel Spaß mit dem Produkt.

# 2. Technische Daten

Anschluss: 230V

Leistung: 300W

Größe: ca. 140cm x 60cm

Größe Heizbereich: ca. 120cm x 55cm

# 3. Zweckbestimmung

Die Heizdecke dient zum Erwärmen von Liege und Patient vor und während der Behandlung.

# 4. Aufbau und Betrieb

Die Heizdecke besteht aus 2 Bestandteilen

- Heizdecke selbst, Oberseite Kunstleder, Unterseite Antirutschbelag, mit Anschluss für Controller.
- Controller mit Taster und Dreh Rad.

# 5. Bedienung

- Zum Verwenden der Heizmatte muss der Controller mit der Heizdecke verbunden werden.
- Legen Sie die Heizdecke auf eine Unterlage Ihrer Wahl.
- Drücken Sie den Tastknopf auf dem Controller 1 mal um die Heizdecke anzuschalten.
- Es wird die momentane Temperatur angezeigt.
- Drehen Sie an dem Dreh Rad um die gewünschte Temperatur einzustellen und lassen dann das Dreh Rad wieder los.

- Nach dem Loslassen des Rades blinkt die Anzeige dreimal und zeigt dann wieder die momentane Temperatur an.
- Die Anzeige steigt nun kontinuierlich mit der Zunahme der Temperatur bis auf den eingestellten Wert.
- Nach einer Stunde des Betriebs schaltet die Heizdecke automatisch aus (Sicherheitsabschaltung, damit ein versehentliches Vergessen des Betriebs ausgeschlossen ist). Sie können diese jedoch sofort wieder anschalten. Dazu drücken Sie erneut einmal auf den Taster des Controllers. Die Stunde Betrieb beginnt nun wieder von vorne. Sie können die Heizdecke so oft hintereinander starten, wie sie möchten.

## 6. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät nicht wenn Beschädigungen oder Quetschungen der Kabels festgestellt werden oder Sprünge/Risse im Gehäuse des Controllers zu sehen sind.
- 1h Sicherheitsabschaltung ist integriert.
- Die Pflicht zu einer regelmäßigen elektrotechnischen Überprüfung ergibt sich aus den individuellen Vorschriften die für den jeweiligen Anwender gelten. Diese Überprüfung ist ggf. selbständig und auf eigene Kosten in Auftrag zu geben.

## 7. Reinigung und Wartung

Das Leder ist desinfektionsmittelbeständig und darf mit Oberflächendesinfektionsmitteln behandelt und gereinigt werden. Entfernen sie bitte täglich die Heizdecke von der Liege und reinigen auch unter der Heizdecke, da es sonst (nach längerer Zeit) zum Verkleben/Anhaften des Antirutschbelages mit der Liege kommen kann.

Die Heizdecke muss nicht regelmäßig gewartet werden. Bitte senden Sie uns die Heizdecke zur Reparatur, sollten Sie eine Beschädigung feststellen.

## 8. Fehler

- Der Controller zeigt E1 an > das bedeutet, dass der Temperaturfühler in der Matte nicht richtig funktioniert und so aus Sicherheitsgründen die Matte abgeschaltet ist. Bitte senden Sie die Matte incl. Controller zur Wartung an uns.
- Der Controller zeigt nichts an (bleibt dunkel) > Stromzuleitung prüfen > wenn dort kein Fehler zu finden ist, bitte die Matte incl. Controller an uns senden
- Alles sieht „normal“ aus, aber die Temperatur steigt nicht über Zimmertemperatur > das deutet auf eine Unterbrechung des Stromflusses in der Matte hin und die Matte muss zur Reparatur eingeschendet werden.

### WICHTIG:

1. Das Produkt sollte von qualifizierten und geschulten Mitarbeitern bedient werden, die mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut sind.
2. Die nicht ordnungsgemäße Verwendung, Bedienung und Instandhaltung des Produktes ist unzulässig und kann zu Sachschäden führen, für die der Hersteller keine Haftung trägt. Die Kosten gehen zu Lasten des Benutzers.
3. Stimmen das Funktionieren und die Parameter des Gerätes nicht mit der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung überein, darf das Gerät nicht betrieben werden. Dies sollte dem Hersteller bzw. Lieferanten unverzüglich mitgeteilt werden.
4. Jede Reparatur des Produkts muss durch qualifizierte Servicetechniker durchgeführt werden. Die Nicht-Einhaltung dieser Anforderung führt zum Verlust der Garantie.

Der Hersteller haftet nicht für die Folgen, die aus unsachgemäßer Verwendung (Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung) des Produktes entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Sicherheitshinweise

Bitte Bedienungsanleitung lesen.

Anwendungsteil Typ B

Hersteller RelaxSensation 83119 Obing

Gerät Klasse II

Achten Sie im Bedarfsfall auf eine fachgerechte Entsorgung.



Hersteller:

RelaxSensation, Franz-Geist-Str. 21, 83119 Obing

Tel.: +49 8624 / 8750650

Mail: [info@relax-sensation.de](mailto:info@relax-sensation.de)

web: [www.relax-sensation.de](http://www.relax-sensation.de)



# 7. Garantiekarte

1. RelaxSensation gewährt eine 24-Monate Garantie für das angelieferte Produkt und eine 12-Monate Garantie für seine Polsterbezüge. Auf die elektrischen Komponenten gewähren wir 5 Jahre Garantie. Die Gewährleistungsfrist läuft ab dem Auslieferungsdatum.
2. RelaxSensation ist im Rahmen der gewährten Garantie für die quantitativen und qualitativen Mängel zuständig, die direkt nach dem Auspacken des Vertragsgegenstandes beim Empfänger ermittelt werden. Der Empfänger ist verpflichtet, die quantitativen Mängel innerhalb von 2 Arbeitstagen schriftlich mitzuteilen.
3. Die Garantieleistungen sind ausschließlich durch den Garantie-Service der Fa. RelaxSensation oder durch eine von der Fa. RelaxSensation beauftragte Servicestelle durchzuführen.
4. Der Benutzer ist zur richtigen Wartungspflege des Gerätes und der Anlage verpflichtet, ansonsten verliert er Garantie-Rechte.
5. Der Garantie unterliegen keine Fehler, die infolge natürlicher Abnutzung der Bauelemente entstanden sind und nicht aufgrund mangelhafter Materialien oder Herstellungsfehler entsteht. Die Schäden, die aus Mangel an Wartung entstanden sind unterliegen ebenfalls keiner Garantie.
6. RelaxSensation haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers oder Patienten während des Betriebs des installierten Gerätes bei Nichteinhaltung der angelieferten Montage- und Bedienungsanleitung.
7. Der Benutzer trägt das Risiko, das mit der Nutzung der mit der Garantie umfassten Geräte verbunden ist. Im Rahmen der gewährten Garantie haftet die Firma RelaxSensation nicht für den Verlust von erwarteten Vorteilen und die zu tragenden Kosten infolge der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung dieser Geräte.
8. Sämtliche Fehler, die während der Garantiezeit durch den Benutzer schriftlich nicht angemeldet werden, unterliegen keiner Garantie.
9. Die Kosten der ungerechtfertigten Fehler-Meldung trägt der Benutzer.
10. Der Garantie unterliegt kein Gerät, in dem:
  - die Schäden infolge des nicht bestimmungsgemäßen Betriebs entstanden sind
  - eigenständige Reparaturen oder Umänderungen durch unbefugte Personen durchgeführt wurden
  - mechanische Beschädigungen entstanden sind (z.B.: während des unsachgemäßen Transports)
  - Schäden durch Feuer und Entladungen in der Atmosphäre oder andere schicksalhaften Ereignissen entstanden sind.